

QUOI ?

Matériel ou surface à nettoyer et désinfecter



HYGIÈNE DES MAINS

Fait partie des précautions standards à appliquer par tous les praticiens et leurs assistantes



SURFACES DM NON CRITIQUES

Adapter la solution en fonction de la sensibilité à l'alcool des matériaux de surface



INSTRUMENTS

Instruments rotatifs : fraises, instruments diamantés, polissoirs, inserts, etc.
Instruments à canaux : limes endodontiques, etc.
Instruments à main : sondes, miroirs, précelles, pinces...



PORTES-INSTRUMENTS DYNAMIQUES

(turbines, contre-angles, pièces à main etc.)



SYSTÈME D'ASPIRATION

Canules, connecteurs, tuyaux, ensemble du système d'aspiration et séparateur d'amalgame



EMPREINTES ET ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES



ÉLÉMENTS PROTHÉTIQUES, PORTES-EMPREINTES ET INSTRUMENTS



QUALITÉ DE L'EAU DE SOIN

Maîtrise de la qualité de l'eau de soin



DÉCHETS

Objets piquants, coupants, tranchants (OPCT)
Déchets d'activité de soin à risque infectieux (DASRI)
Amalgames

COMMENT ?

Procédure à appliquer


Rappel des 5 indications de l'hygiène des mains

- Avant de toucher un patient
- Après avoir touché un patient
- Après un geste aseptique
- Après avoir touché l'environnement d'un patient
- Après un risque d'exposition à un liquide biologique

A réaliser sur les mains

- Sans bijou ni alliance ni montre ou bracelet
- Avec ongles courts sans vernis
- Visiblement propres et sèches
- Non poudrées

Technique pour gel hydroalcoolique

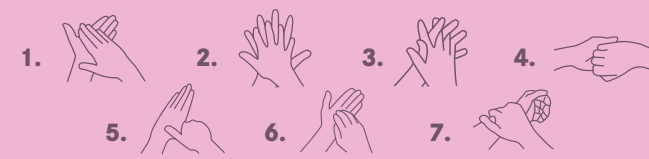

Pour les surfaces **non-sensibles à l'alcool** :

Asperger intégralement les surfaces à nettoyer et à désinfecter à l'aide du spray **ou appliquer à l'aide d'un support non tissé** à usage unique ou d'une lingette imprégnée, **laisser agir le temps indiqué**.

Produit ne nécessitant pas de rinçage.

Pour les surfaces **sensibles à l'alcool** :

Asperger intégralement les surfaces à nettoyer et à désinfecter à l'aide du spray **ou appliquer à l'aide d'un support non tissé** à usage unique ou d'une lingette imprégnée, **laisser agir le temps indiqué et retirer les excédents de produits** à l'aide d'un support non-tissé à usage unique ou d'une lingette. Produit ne nécessitant pas de rinçage.

1. Pré-désinfection

Au plus vite et au plus près du patient immerger dans une solution détergente-désinfectante afin d'éviter que les souillures ne sèchent et commencer le processus de désinfection

2. Transport en sécurité jusqu'à la salle de stérilisation

3. Rinçage

4. Passage aux ultrasons (facultatif)

5. Nettoyage manuel avec brossage (avec carte ou brosse en nylon), rinçage et séchage ou passage en machine (ex : thermo-laveur)

6. Pour le **matériel thermosensible** et en l'absence de thermo-désinfecteur : désinfection de niveau intermédiaire, rinçage, séchage et stockage

7. Conditionnement

8. Stérilisation et stockage

Traitement manuel (se référer aux instructions du fabricant) :

1. Dès la fin de l'utilisation, **après réalisation de la purge**, débrancher l'instrument de l'unit

2. Nettoyage et désinfection : au plus vite afin d'éviter que les souillures ne sèchent.

Extérieur : nettoyage et désinfection avec lingettes imprégnées de solution détergente-désinfectante type Minuten ou support non tissé à usage unique.

Intérieur : nettoyage avec WL-clean et désinfection avec WL-cid

3. Séchage avec WL-blow ou WL-dry

4. Lubrification

5. Emballage

6. Stérilisation

Filtre : nettoyer et désinfecter avec une solution nettoyante-détergente (type BIB forte eco)

Canule pompe à salive : usage unique

Canule haute vélocité : usage unique ou pré-désinfection après chaque patient (type BIB forte eco) nettoyage, conditionnement, stérilisation.

Connecteurs et partie extérieure des tuyaux :

Après chaque soin : nettoyage et désinfection à l'aide d'un support non-tissé à usage unique imprégné de solution détergente-désinfectante (type Plastisept eco spray ou Minuten spray) ou d'une lingette (Plastisept eco Maxi Wipes ou Minuten Wipes).

Réseau de tuyaux et système interne dans son ensemble :

Après un acte sanglant : Procéder à un rinçage abondant avec de l'eau froide.
En fin de journée : **nettoyage** avec Alprojet W ou **désinfection** avec Alprojet DD.
Laisser poser la nuit et rincer le lendemain avec de l'eau froide.

Attention : Avant utilisation de nos produits nous recommandons un nettoyage intensif chaque soir pendant 2 semaines avec ALPROJET W.

POUR LA DÉSINFECTION

Immédiatement après la prise d'empreinte :

Rincer à l'eau durant minimum 15 secondes. **Immersion** de 5 minutes dans la solution PrintoSept ID, rinçage, séchage ou égouttage (à adapter selon les matériaux d'empreinte).

Les éléments prothétiques sont livrés désinfectés sinon réaliser une désinfection à l'aide de PrintoSept ID: immersion pendant 5 minutes puis rinçage abondant et séchage.

POUR LE NETTOYAGE

Pour l'élimination du tartre et des résidus de ciments de scellement provisoire sur les éléments prothétiques : immersion dans un bac à ultrasons ou dans un bac de trempage avec une dilution à 10 - 20% avec de l'eau du réseau. En bac à ultrasons et en cas d'encrassement faible : dilué à 5% pendant 2 à 10 minutes. Dans tous les cas procéder à un rinçage soigneux après l'immersion des spatules et des instruments.

Pour le nettoyage des instruments, spatules et portes-empreintes :

En bain de trempage avec application pendant une nuit ou en **bain à ultrasons** 10 minutes pour dissoudre les résidus d'oxyde de zinc, d'eugénol, de carboxylate, de ciments au phosphate et au verre ionomère, d'alginates et de vernis adhésifs sur les porte-empreintes, les spatules et les instruments.

Prérequis à la mise en place d'un traitement de l'eau de soin :

- Installation d'un réservoir sur l'unit si ce dernier n'en possède pas. (prévoir un jeu de 2 réservoirs par unit dentaire)
- Mise en place d'un **filtre 0,22µm** tous germes sur un robinet pour alimenter le réservoir.
- Intervention d'un technicien pour nettoyer et désinfecter le circuit hydrique de l'unit dentaire.

Traitement continu et intermittent :

Application unit en travail : alimenter l'unit via le réservoir avec ALPRON

- Purger en début de vacation entre chaque patient et en fin de vacation.
- Purger chaque cordon et la seringue manuellement **jusqu'à ce que le liquide bleu sorte** et laisser l'unit ainsi jusqu'à reprise du travail.

Protocole de la désinfection du réservoir 1x/semaine :

- Détacher le réservoir, le vider et **utiliser un flacon de BC san 100** dilué dans de l'eau filtrée, laisser agir minimum 6h et rincer abondamment après utilisation. Laisser sécher tête en bas sur un support non tissé à usage unique jusqu'à la prochaine utilisation.

Tous les objets piquants, coupants, tranchants doivent être triés dès leur production (dans la salle de soins) dans les conteneurs ou emballages réservés à leur élimination. Les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) doivent être éliminés par une filière spécifique en utilisant des collecteurs normalisés et un contrat de collecte doit être signé avec un collecteur-transporteur. Une poubelle pour ces déchets doit être prévue à proximité de la salle de soins.

Les déchets d'amalgames : les déchets secs et les résidus évacués au niveau du séparateur d'amalgames doivent être collectés par un prestataire auprès de qui un contrat est établi.

AVEC QUOI ?

Produits, opération, dosage, temps d'action et autres recommandations

CREMANA®-WASH

Solution lavante pour les mains



Ref. AP3518

ALPROSEPT-HDE

Solution hydroalcoolique



Ref. AP5019

MINUTEN

Avec alcool



Ref. AP3052

AP3053

Ref. AP4715

AP3005

PLASTISEPT

Sans alcool



Ref. AP4626

AP4740

Ref. AP4645

AP4646

DC EVO




Ref. DCE1 (1L)

DCE5 (5L)

Dilution 0,5% pour la pré-désinfection en bac de trempage et à 1% en bac à ultrasons en consécutif (protocole complet P.16 de la brochure).

MINUTEN

Avec alcool

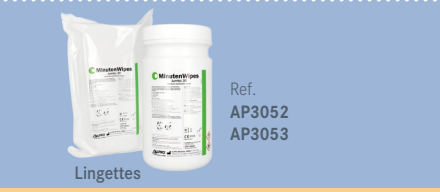

Ref. AP3052

AP3053

WL SYSTEM



Ref. AP4150

AP4140

AP3165

Nettoyage : ALPROJET W

Préparer 2 litres de solution à 5% de dilution (100ml) avec de l'eau chaude



Ref. AP3105

Désinfection : ALPROJET DD

Préparer 2 litres de solution à 2% de dilution (40ml) avec de l'eau chaude



Ref. AP3115

Ref. AP3085

PRINTOSEPT ID

A utiliser pur par immersion pendant 5 min



Ref. AP4500

TARCLEAN



Ref. AP3077

LC1



Ref. 9831

ALPRON : dilution 1%

BILPRON : prêt à l'emploi

BC San 100 : 1 flacon de 100ml pour 1 réservoir

Filtres 0,22m tous germes

+ Lingettes Minuten Wipes / Minuten Spray pour le filetage du support du réservoir et le plonger



Ref. AP3183

AP3181

AP3199

MINUTEN

Avec alcool



Ref. AP3052

AP3053

BC SAN 100 : procéder à une décontamination des contenants peut vous permettre d'optimiser l'utilisation des emballages et participer ainsi à la sauvegarde de la planète.



Ref. AP3199

QUAND ?

Timing, fréquences, séquences

Le lavage simple est pertinent uniquement lorsque les mains sont visiblement **souillées, mouillées ou poudrées**. A la prise d'activité inclure **un brossage des ongles**.

Avant et après **chaque soin et examen**.
Immédiatement après le retrait des gants non poudrés.

Au début de la journée, **entre chaque patient** et en fin de journée.

Après préparation de la solution prête à l'emploi, **la solution en usage se conserve jusqu'à 5 jours**.
Renouveler le bain si il se trouble.

Après chaque utilisation

Tous les jours et à adapter en fonction du type d'installation

Récupérateur d'amalgame situé au **niveau du fauteuil** :

Lun Mar Mer Jeu Ven
DD DD DD W W

Récupérateur d'amalgame situé dans un **local technique** :

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
Lun-Ven Lun-Ven Lun-Ven Lun-Ven
DD W DD W

Lorsque c'est nécessaire

Au cabinet

Au plus près de la prise d'empreinte, après rinçage et obligatoirement avant envoi au laboratoire.

En laboratoire

Après la réalisation de l'élément prothétique par le laboratoire, et avant remise au praticien.

Tous les jours, lorsque l'unit est en travail :

Alpron dilué à 1% avec eau filtrée (0,22m tous germes)

A chaque **interruption de travail de plus de 24h** : Bilpron pur

1x/semaine: décontamination du réservoir en place avec BC San 100

1x/mois : remplacement du filtre (ou en fonction de sa DLU)

Quotidiennement / Après chaque acte



Visite conseil


Notre experte en hygiène et désinfection se tient à votre disposition.



Christine GROSSE
c.grosse@komet.fr
06.19.31.15.15


Fiche de stock

Retrouvez tous nos produits sur votre fiche de stock pour une commande facilitée.

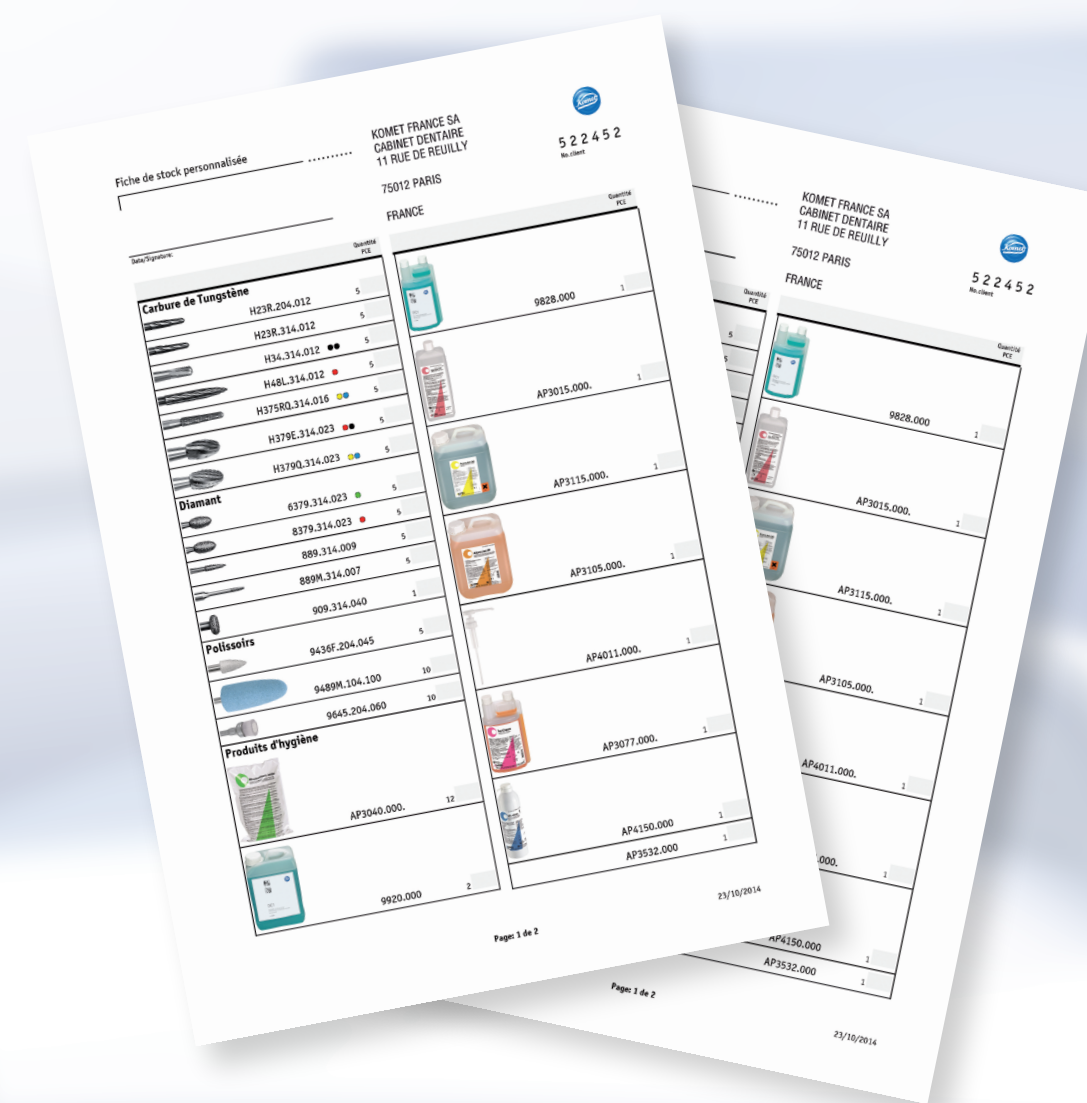

Vous cherchez un autre protocole ?

RDV sur notre chaine Youtube.

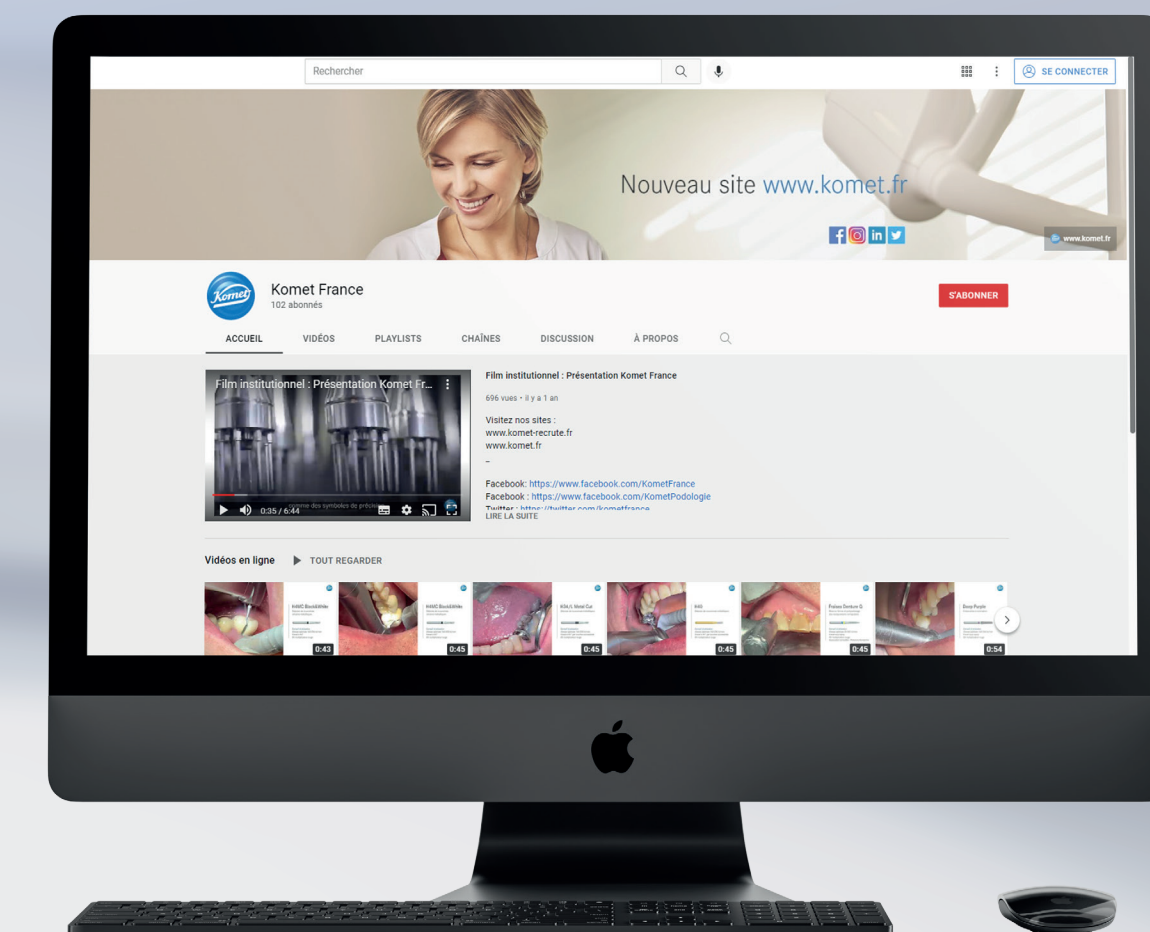

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet

