



LC1



9831

Concentré liquide pour le nettoyage des instruments et des portes-empreintes.

En une nuit ou si nécessaire dans un bain à ultrasons, la solution LC1 dissout : les résidus d'oxyde de zinc, d'eugénol, de carboxylate, de ciments au phosphate et au verre ionomère, d'alginate et de vernis adhésifs sur les porte-empreintes, les spatules et les instruments.

S'utilise également pour éliminer les restes de plâtre sur les fraises en carbure de tungstène.

- Ne détériore pas, ne raye pas et n'attaque pas les surfaces encrassées
- Exempt de composants oxygénés, aucune oxydation possible
- Compatible avec les porte-empreintes en aluminium
- Liquide non alcalin et biodégradable
- Nettoyage accéléré dans un bain à ultrasons (5 – 10 minutes suffisent)

Bain de trempage pour le nettoyage d'instruments :

Adapter la concentration de la solution LC1 en fonction du degré de salissure.

Quantité nécessaire de Komet® LC1 :			
Solution prête à l'emploi			
	3%	5%	10%
1 litre	30 ml	50 ml	100 ml
2 litres	60 ml	100 ml	200 ml
3 litres	90 ml	150 ml	300 ml
4 litres	120 ml	200 ml	400 ml
5 litres	150 ml	250 ml	500 ml

Utilisation :

Nettoyer grossièrement les porte empreintes, les spatules et les instruments et laisser tremper la nuit dans le bain de nettoyage. Pour finir, éliminer les résidus dissous sous l'eau courante à l'aide d'une brosse.

L'emploi dans le bain à ultrasons permet un nettoyage plus rapide.

Dans ce cas, 5 – 10 minutes suffisent.

La solution doit être renouvelée tous les 2 jours.

Attention !

La solution LC1 ne permet pas de retirer les résidus de matériaux d'empreinte à base de polyéthers. Non compatible avec les forets et les fraises en acier non traité, les polissoirs en silicone et les brosettes. Nettoyer séparément les porte-empreintes en aluminium !

A ne pas utiliser pour le nettoyage des prothèses dentaires !

Composition :

Alcane-sulfonate de sodium, agents séquestrants.

Les composants du LC1 sont biodégradables conformément aux Directives de l'OCDE.

Observations :

Risque de dommages oculaires sévères. Eviter tout contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Porter une protection du visage ainsi que des lunettes. Le LC1 ne doit pas être mélangé à d'autres produits nettoyants et/ou de désinfection.

Durée de conservation :

Liquide concentré: 36 mois

La solution en usage (une fois diluée) doit être renouvelée tous les 2 jours.

Conditionnement :

9831

Bidon de 5 litres

