
PROTOCOLE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉ

et/ou avec récupérateur d'amalgame situé dans **un local technique.**



PROTOCOLE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASPIRATION CENTRALISÉ et/ou avec récupérateur d'amalgame situé dans un local technique.



AVANT DE DÉMARRER LE PROTOCOLE, procéder à un nettoyage intensif du système en appliquant AlproJet W (nettoyant-détartrant) après le dernier patient **pendant 2 semaines** conformément aux indications ci-dessous. Nettoyer et désinfecter les filtres tous les jours et les changer en suivant les recommandations du fabricant.

PUIS PROCÉDER AU PROTOCOLE HEBDOMADAIRE SUIVANT,

Semaine 1					Semaine 2				
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven
DD	DD	DD	DD	DD	W	W	W	W	W



AlproJet-W | Nettoyant/Détartrant (Après le dernier patient)

1 Préparation

- 1a. 1 litre d'eau chaude du robinet.
- 1b. Ajouter Alprojet-W (100ml).
- 1c. Compléter d'eau chaude jusqu'à 2 litres.



2 Nettoyage du système d'aspiration

a. Unit avec crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer 1 litre de solution, verser le reste de solution dans le crachoir.

b. Unit sans crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer à totalité de la solution (positionner les tubulures longues fournies à la place des 2 tubulures d'origine).

3 Temps d'action



Laisser agir la nuit.

4 Rinçage

(le matin avant de reprendre le travail)



Remplir le récipient avec 2 litres d'eau froide.
Pour les unités avec crachoir, aspirer 1 litre puis verser le second dans le crachoir.
Pour les unités sans crachoir, aspirer la totalité des 2 litres.



AlproJet-DD | Désinfectant (Après le dernier patient)

1 Préparation

- 1a. 1 litre d'eau chaude du robinet.
- 1b. Ajouter Alprojet-DD (40ml).
- 1c. Compléter d'eau chaude jusqu'à 2 litres.



2 Désinfection du système d'aspiration

a. Unit avec crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer 1 litre de solution, verser le reste de solution dans le crachoir.

b. Unit sans crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer à totalité de la solution (positionner les tubulures longues fournies à la place des 2 tubulures d'origine).

3 Temps d'action



Laisser agir la nuit.

4 Rinçage

(le matin avant de reprendre le travail)



Remplir le récipient avec 2 litres d'eau froide.
Pour les unités avec crachoir, aspirer 1 litre puis verser le second dans le crachoir.
Pour les unités sans crachoir, aspirer la totalité des 2 litres.

Après tout acte sanglant, rincer abondamment avec 2 litres d'eau froide



Scanner le QR code pour visionner la vidéo du protocole

Pour toute question, se référer à la fiche produit, ainsi qu'à la fiche de données sécurité, disponibles sur notre site www.komet.fr ou contacter Mme Christine GROSSE au 06.19.31.15.15.

Dispositifs médicaux : Classe I & Classe IIa | Organisme notifié : TÜV Süd GmbH (0123) | Fabricant : Alpro Medical GmbH (Pour toute information se référer à la notice d'utilisation).



Lunettes ou Visière



Gants à usage unique



Masque de protection



Tablier plastique à usage unique