
PROTOCOLE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASPIRATION
avec récupérateur d'amalgame situé **au niveau du fauteuil.**



PROTOCOLE D'ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ASPIRATION avec récupérateur d'amalgame situé au niveau du fauteuil.



AVANT DE DÉMARRER LE PROTOCOLE, procéder à un nettoyage intensif du système en appliquant Alprojet W (nettoyant-détartrant) après le dernier patient **pendant 2 semaines** conformément aux indications ci-dessous. Nettoyer et désinfecter les filtres tous les jours et les changer en suivant les recommandations du fabricant.

PUIS PROCÉDER AU PROTOCOLE HEBDOMADAIRE SUIVANT,

Lun Mar Mer Jeu Ven
DD DD DD W W



Alprojet-W | Nettoyant/Détartrant (Après le dernier patient)

1 Préparation

- 1a. 1 litre d'eau chaude du robinet.
- 1b. Ajouter **Alprojet-W (100ml)**.
- 1c. Compléter d'eau chaude jusqu'à 2 litres.



2 Nettoyage du système d'aspiration

a. Unit avec crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer 1 litre de solution, verser le reste de solution dans le crachoir.

b. Unit sans crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer à totalité de la solution (positionner les tubulures longues fournies à la place des 2 tubulures d'origine).

3 Temps d'action



Laisser agir la nuit.

4 Rinçage

(le matin avant de reprendre le travail)



Remplir le récipient avec 2 litres d'eau froide.
Pour les unités avec crachoir, aspirer 1 litre puis verser le second dans le crachoir.
Pour les unités sans crachoir, aspirer la totalité des 2 litres.



Alprojet-DD | Désinfectant (Après le dernier patient)

1 Préparation

- 1a. 1 litre d'eau chaude du robinet.
- 1b. Ajouter **Alprojet-DD (40ml)**.
- 1c. Compléter d'eau chaude jusqu'à 2 litres.



2 Désinfection du système d'aspiration

a. Unit avec crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer 1 litre de solution, verser le reste de solution dans le crachoir.

b. Unit sans crachoir



Insérer les 2 tuyaux d'aspiration sur les 2 embouts et aspirer à totalité de la solution (positionner les tubulures longues fournies à la place des 2 tubulures d'origine).

3 Temps d'action



Laisser agir la nuit.

4 Rinçage

(le matin avant de reprendre le travail)



Remplir le récipient avec 2 litres d'eau froide.
Pour les unités avec crachoir, aspirer 1 litre puis verser le second dans le crachoir.
Pour les unités sans crachoir, aspirer la totalité des 2 litres.

Après tout acte sanglant, rincer abondamment avec 2 litres d'eau froide



Scanner le QR code pour visionner la vidéo du protocole

Pour toute question, se référer à la fiche produit, ainsi qu'à la fiche de données sécurité, disponibles sur notre site www.komet.fr ou contacter Mme Christine GROSSE au 06.19.31.15.15.

Dispositifs médicaux : Classe I & Classe IIa | Organisme notifié : TÜV Süd GmbH (0123) | Fabricant : Alpro Medical GmbH (Pour toute information se référer à la notice d'utilisation).



Lunettes ou Visière



Gants à usage unique



Masque de protection



Tablier plastique à usage unique