



# MinutenSpray

Solution pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.



Solution à base d'alcool prête à l'emploi, sans aldéhyde et sans phénol pour le nettoyage et la désinfection rapides des surfaces des dispositifs médicaux non-critiques et du mobilier comme par exemple les manettes d'unit, les tablettes, l'unit, etc...

- Sans aldéhyde et sans phénol
- Action rapide
- Avec effet rémanent (inhibition de la recontamination microbienne après séchage)

## Composants

Contenu pour 100 g de solution active :

- 45 g éthanol
- 15 g isopropanol
- 0,1 g digluconate de chlorhexidine
- 0,08 g trialkylethoxyammoniumpropionat
- 0,05 g dérivés d'alkylamine

## Spectre et temps d'action

- Bactéricide** .....60 sec.  
(y compris TBC et MRSA)
- Levuricide**.....60 sec.  
(y compris candida albicans)
- Virucide HBV/HIV**.....60 sec.  
(actif contre les virus enveloppés et non-enveloppés)
- BVDV** (virus modèle de l'hépatite C)
- Influenza (H5N1, H1N1)** .....30 sec.
- HSV, Vaccinia** (variole).....30 sec.
- Adeno et Noro virus** .....2 min.

## Expertises

1. DR. H. BRILL, HAMBURG :  
*MRSA, 2009-07; EN 14561 + EN 14562, 2009-06; Langzeit/Remanenz inkl. EN 13697, 2008-01*
2. PROF. DR. P. HEEG, TÜBINGEN :  
*DGHM, 1999-03*
3. DR. J. HÖFFLER, HAMBURG :  
*EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04*
4. PROF. DDR. E. MARTH, GRAZ :  
*DGHM, 2002-07*
5. PROF. DR. R. SCHUBERT, FRANKFURT/M. :  
*VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05*
6. PROF. DR. H.-P. WERNER, SCHWERIN :  
*VAH, 2009-09; Viruzidie (DVG, Carriertest 2012), 2013-09*
7. DR. J. STEINMANN, BREMEN :  
*Adeno, 2006-03; Vaccinia, 2006-05; BVDV, 2003-11 Virusinaktivierend: behüllte Viren HBV, HCV, HIV, Influenza (inkl. H1N1 + H5N1), Herpes simplex, 2009-08; Corona Virus inkl. Mers-CoV, 2014-05*
8. PROF. DR. H.-P. WERNER, SCHWERIN, VAH, EN 16615, 4-Felder Test, 2016-06, EN 13624+ EN13727+EN14476, 2017-08

### Domaine d'utilisation

MinutenSpray s'utilise pour le nettoyage et la désinfection rapide des surfaces : objets, tablettes, manettes d'units, appareils, touches de commande, mobilier, accoudoirs, poignées de porte etc.

**N'utiliser que sur des surfaces résistantes à l'alcool** (éviter cuir, simili-cuir, bois vernis et peinture).

### Consignes d'utilisation

Vaporiser soigneusement à env. 30 cm de distance des surfaces et des objets à nettoyer et à désinfecter, étaler ensuite avec un support non tissé à usage unique (par ex. Minuten Wipes) et laisser agir conformément au temps de contact préconisé.

### Durée de conservation

3 ans

### Environnement

Les substances actives de MinutenSpray sont biodégradables conformément aux directives de l'OCDE

### Propriétés spécifiques

- Durée de conservation 3 ans
- Compatibilité avec les différents matériaux utilisés au cabinet dentaire
- Agréé par Dentsply Sirona

### Conditionnements

**AP3005** Bidon 5 litres

**AP4715** Pulvérisateur 1L

### Accessoires

**9834A** Bouchon verseur

### Certification

Certificat

CE N° G1 029056 0067 Rev.00

Dispositif médical : Classe IIa Organisme notifié : TÜV Süd GmbH (0123) Fabricant : Alpro Medical GmbH  
02/2020 - 412015V4

