



PlastiSept eco | Maxi Wipes



AP4626

AP4627

Nettoyage et désinfection des surfaces.

Lingettes sans alcool destinées au nettoyage et à la désinfection des surfaces sensibles des dispositifs médicaux comme les unités dentaires, incluant les revêtements en simili-cuir, les tablettes, les appareils de radiographie et le verre acrylique.

- Lingettes non-tissées, résistant à la déchirure, qualité « touché coton » 50 g/m²
- Permet un étalage optimal de la solution
- Nettoyage efficace grâce à la technologie micropore
- Lingettes extra larges 17 x 26 cm, idéal grandes surfaces
- Exempt d'ingrédients allergènes ou sensibles : sans alcool, sans aldéhyde, sans phénol, sans ammonium quaternaire

Composition :

La solution active contient :
 < 2% Alkylamine secondaire et tertiaire,
 eau déionisée, parfum (non allergène),
 agents émulsifiants

Spectre d'action :

- Bactéricide incl. TBC, MRSA
- Levuricide
- Inactive les virus selon la norme EN 16777, actif contre les virus enveloppés à diffusion hématogène HBV, HCV, HIV, Herpès simplex, Influenza (incl. H1N1 + H5N1), BVDV, Vaccinia, Ebola, Corona virus (MERS-CoV) et contre les virus non-enveloppés type Norovirus
- Effet rémanent
- Solution active certifiée par VAH² et DGHM³ pour la désinfection des surfaces.

Pré-nettoyage :

Conformément à la recommandation du RKI (Institut Robert Koch), les surfaces fortement sales doivent être pré-nettoyées.

Temps de contact :

- Bactéricidie (EN13727) 5 min.
- Levuricide (EN13624) 5 min.
- TBC 5 min.
- Inactivation des virus enveloppés (EN14476) 5 min.
- Virus noro non-enveloppé en cas d'épidémie (EN 16777) 120 min.

Domaine d'application :

Les lingettes PlastiSept *eco* Maxi Wipes imprégnées de solution PlastiSept *eco* sont particulièrement adaptées au nettoyage et à la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool comme les revêtements en simili-cuir des unités dentaires, têtes, tablettes, appareils de radiographie et les surfaces en verre acrylique (Plexiglass®).

Utilisation réservée au personnel qualifié portant une tenue de protection adaptée.

Durée de conservation :

2 ans

Après ouverture, les lingettes PlastiSept *eco* Maxi Wipes peuvent être utilisées pendant une durée maximale de 28 jours à condition que le couvercle de la boîte soit toujours correctement refermé après chaque utilisation.

Environnement :

La solution active d'imprégnation des lingettes est biodégradable selon les directives de l'OCDE.

Compatibilité avec les matériaux :

Sans alcool, sans aldéhyde, sans ammonium quaternaire, sans halogène, particulièrement compatible avec toutes les surfaces.

Conditionnement :**AP 4627**

Boîte distributrice vide

AP 4626

Recharges, carton de 4 x 250

Certification :

Certificat

CE N° G1 029056 0067 Rev. 00



AP 4627

AP 4626

Expertises

1. PROF. DR. H.-P. WERNER, SCHWERIN :
VAH² incl. TBC, 2014-05 ; EN 13624 + EN 13727, 2014-03 ; virucide (DVV¹, carrier test 2012) contre virus enveloppés et virus Noro non enveloppé, 2015-03, EN 14476, 2018-04

2. DR.F. BRILL, HAMBURG :
VAH² EN 16615, 2015-12.

¹ (DVV) German Association for the Control of Virus Diseases

² (VAH) Association for Applied Hygiene

³ (DGHM) German society for Hygiene and Microbiology