



TarClean



AP3077

Liquide concentré acide pour l'élimination du tartre, des ciments sur les prothèses et les instruments dentaires.

Liquide concentrée pour l'entretien régulier de toutes les prothèses ou éléments prothétiques sujets à des dépôts de tartre (prothèses, bridges, couronnes)

- Élimination totale des matériaux d'obturation provisoire et des oxydes métalliques ainsi que de nombreux matériaux de revêtement (spatules, verre, etc.)
- Application par trempage (avec ou sans ultrasons)

Composition du produit :

Acide phosphorique, phosphonates, agents tensio-actifs, adjuvants

Domaine d'utilisation :

Élimination à l'acide du tartre et du ciment dans le cadre du nettoyage des prothèses et des instruments dentaires (par ex.: prothèses, éléments prothétiques, protège-dents, éléments utilisés en orthodontie)
Élimination des traces provoquées par les oxydations métalliques et la plupart des matériaux de collage.

Nettoyage :

Pour bain de trempage : dilution à 10 - 20% avec de l'eau du réseau. Aux ultrasons et en cas d'encrassement faible : utiliser une concentration à 5%, pendant 2 à 10 min. Puis rincer soigneusement à l'eau du réseau l'objet ainsi nettoyé.

Durée de conservation :

3 ans

Compatibilité avec les matériaux :

Compatible avec l'acier, les métaux précieux, les matériaux plastiques et l'aluminium ne présentant aucune détérioration.

Conditionnement :

AP3077
Flacon-doseur 1 litre

Certification :

Certificat CE
Code GMDN: 35 871

Dispositif médical : Classe I Organisme notifié : TÜV Süd GmbH Fabricant : Alpro Medical GmbH
05/2019 - 412016V3