

# Protocole d'utilisation Minuten Spray et Minuten Wipes

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux.



## Indications :

Lingettes et spray à base d'alcool pour le nettoyage et la désinfection rapide des surfaces, des dispositifs médicaux non critiques et du mobilier.

## Durée de conservation :

2 ans pour Minuten Wipes / 3 ans pour Minuten Spray.

Après ouverture de la recharge, les lingettes peuvent être utilisées pendant au moins 1 mois à condition de refermer correctement le couvercle après chaque utilisation.

## Avantages des Minuten Spray et Minuten Wipes :

- Boîte distributrice de 200 lingettes avec recharges pour limiter les déchets
- Grand format de lingettes : 21 x 26 cm
- Agit en conditions de saleté avec effet rémanent
- Répond à toutes les normes (détails au verso du document)
- Disponible en deux versions (spray/lingette) pour adapter l'application en fonction de la surface à traiter



Réf.AP3052  
Réf.AP3053  
Réf.AP4715

### Étape 1

Avant d'utiliser Minuten Spray ou Minuten Wipes, procéder à un lavage des mains ou réaliser une friction hygiénique des mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique (type AlproSept HDE) puis enfiler une paire de gants.



### Étape 2

#### Option 1 «Utilisation des lingettes» :


Prendre une lingette Minuten Wipes et l'appliquer sur la surface à traiter en frottant, si besoin ajouter de la solution Minuten Spray directement sur la surface ou sur la lingette afin de pouvoir couvrir une surface plus importante. Renouveler l'opération pour chaque changement de surface à traiter.



Option 1

#### Option 2 «Utilisation de la solution en spray» :

Pulvériser directement la solution Minuten Spray sur un support non-tissé à usage unique puis étaler et frotter la surface à traiter (le pulvérisateur du spray dispose de 2 positions : spray et mousse afin de limiter l'aérosolisation). Renouveler l'opération pour chaque changement de surface à traiter.

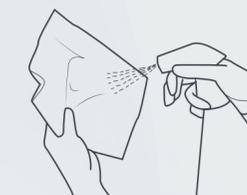

Option 2

### Étape 3



Laisser agir 2 minutes et ne pas essuyer.

Refermer la boîte pour que lors de la prochaine utilisation, votre lingette soit bien imprégnée et ne sèche pas.



### Étape 4

Jeter la lingette et/ou le support à usage unique utilisé(s) puis retirer les gants. Procéder à un lavage des mains ou réaliser une friction hygiénique des mains à l'aide d'une solution hydroalcoolique (type AlproSept HDE).



# Spectre d'activité et temps d'action



Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces des dispositifs médicaux.



## Rappels :

Les surfaces de l'unit dentaire et celles situées à proximité sont contaminées lors des soins et peuvent constituer un réservoir de micro-organismes responsables de contaminations croisées. Le nettoyage et la désinfection des surfaces de l'unit et à proximité de l'unit doivent être réalisés entre chaque patient.

## CRITÈRES DE TEST : Conditions de saleté :

### En 1 minute :

- Bactéricide (EN 13727), MRSA (test en suspension)
- Levuricide (EN 13624)
- Tuberculocide (EN 14348)

### En 2 minutes :

- Bactéricide (EN 14561, EN 16615)
- Levuricide (EN 14562, EN 16615)
- Virucide (EN 14476), actif sur tous les virus enveloppés (HIV, HCV, HBV, Influenza, Coronas virus, etc)

## CRITÈRES DE TEST : Conditions de propreté :

### En 2 minutes :

- Virucide (EN 16777), actif sur les virus non enveloppés adeno et noro virus

## Comment recharger ma boîte de lingettes ?

- Prendre une recharge
- Découper la partie supérieure au niveau de l'encoche prévue à cet effet
- Positionner la recharge (en conservant l'emballage plastique) avec les lingettes dans la boîte distributrice
- Engager la lingette située au centre dans l'opercule du capuchon de la boîte
- Veiller à bien refermer la boîte après chaque utilisation

